

nova^{PRO}

Fußpflegegeräte für die
Podologie und Fußpflege



BUCK[®]



Simeon Ruck
Geschäftsführer der HELLMUT RUCK GmbH

Liebe Kundinnen und Kunden,

in der Podologie und Fußpflege stehen für uns zwei Dinge im Fokus: die Fachkräfte und ihre anspruchsvolle Arbeit am Fuß. Unser Anspruch ist es, Ihnen ein Fußpflegegerät an die Seite zu stellen, das Ihren Arbeitsalltag spürbar erleichtert, wertvolle Zeit für Ihre Patient:innen schafft und eine ruhige, konzentrierte Behandlungsumgebung unterstützt. Dafür hinterfragen wir konsequent jedes Detail unserer Produkte – alles Überflüssige weicht, das Wesentliche bleibt.

Das Ergebnis: Nova Pro und Nova SE – zwei Fußpflegegeräte, die höchste Ansprüche erfüllen. Mit dem Nova Pro erleben Professionals ein Gerät, das Innovation, Präzision und Effizienz in sich vereint. Leise, leistungsstark und intuitiv gestaltet es den Praxisalltag mühelos. Die Bedienung über das moderne Touchdisplay ist so einfach, wie Sie es von Ihrem Smartphone kennen. Der Nova SE bringt mit Work with ease die Leichtigkeit

in den Arbeitsalltag. Entwickelt für alle Fußpfleger, die Wert auf eine mühelose Handhabung und zuverlässige Leistung legen – klein, leicht und voller Power.

Mit dem neuen Hygienekonzept setzen wir auf kompromisslose Reinheit. Das 2-Filterssystem kombiniert einen Staubfilterbeutel mit einem zusätzlichen HEPA-Filter für maximale Luftreinigung. Der abnehmbare und sterilisierbare Wechselspannkopf sowie der Flex-Saugschlauch, der komplett entfernt und innen wie außen gereinigt werden kann, sorgen für eine mühelose und gründliche Pflege.


Das Herzstück der neuen Nova Generation wurde von unserem Entwicklungsteam so gestaltet, dass es die ideale Symbiose aus kraftvoller Absaugleistung und extrem leiser Geräuschemission ist. So können Sie auch bei anspruchsvollen Behandlungen in einer angenehmen und konzentrierten Atmosphäre arbeiten.

Wir haben die neuen Fußpflegegeräte nicht nur entwickelt, sondern produzieren diese auch erstmals selbst in unserer Manufaktur in Neuenbürg. Zusammen mit CarePlus können Sie sich auf nachhaltige Betriebssicherheit in Ihrer Praxis verlassen.

Lassen Sie sich von den Innovationen des Nova Pro inspirieren – entwickelt, um Sie optimal in Ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen und Ihre professionelle Arbeit auf ein neues Level zu heben – Feel your PRO!

Ihr Simeon Ruck

feel your **PRO**

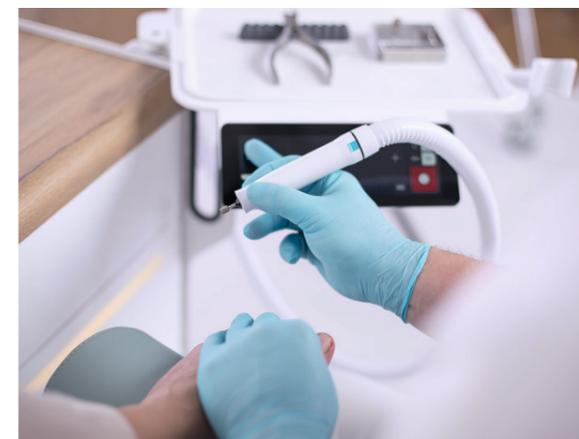

Fußpflegegerät Nova Pro

Feel your PRO	4
Klein, leicht – und voller Innovation.	6
Perfect Touch – innovative Bedienung wie beim Smartphone.	8
Das Handstück – leicht, komfortabel und intelligent.	9
Aufgeräumt und ergonomisch.	10
Steuern Sie Ihre Praxis mit dem Nova Pro.	11

Fußpflegegerät Nova SE

Work with eaSE	12
----------------	----

Welcher Nova passt zu mir?	14
Colour up your work.	15
Clever und schnell, der RUCK-Wechselspannkopf.	16
Hygiene auf neuem Level.	17
It's a match!	
Passt perfekt in Ihre Lieblingseinrichtung.	18
Das Hygienekonzept – Reinheit ohne Kompromisse.	20
CarePlus	21

Vom Goldschmiedemotor zum Hightech Podologiegerät.	22
Teamwork at it's best. Wie der Nova entstand.	23

wow!*

* das war der Ausruf einer unserer Testkund:innen beim ersten look & feel des neuen Nova Pro. Sind Sie bereit für Ihr "wow"?



nova **PRO**



feel your **PRO**

Feel your PRO – spüren Sie Professionalität. Das neue RUCK Fußpflegegerät Nova Pro setzt Maßstäbe in Design und Handhabung. Mit modernster Technologie und jahrzehntelanger Erfahrung entwickelt, bietet es intuitive Bedienung und kraftvolle Leistung – perfekt abgestimmt auf die täglichen Anforderungen in Ihrer Praxis. Dank der Medizinprodukte-Zulassung steht es für höchste Sicherheit und Qualität – für professionelle Arbeit auf höchstem Niveau.



nova^{PRO}



Klein, leicht – und voller Innovation.

Technische Daten:

- > Medizinprodukt Klasse 2a
- > NovaConnect
- > Abnehmbares 7,8" TFT-Touchdisplay
- > 30 Favoriten je Benutzer
- > 18 Sprachen auswählbar
- > Handstück-Drehzahl: 40.000 U./Min.
- > Automatische Start-Stopp-Funktion
- > Maximale Absaugleistung 320 l/Min.
- > Gewicht: 2,75 kg



Jetzt
kaufen

Fußpflegegerät Nova Pro

Das RUCK Fußpflegegerät Nova Pro vereint modernste Technologie und höchste Sicherheit als Medizinprodukt der Klasse 2a. Ein 2-Filterssystem und ein Konzept zur Schlauchreinigung sorgen für Reinheit und kompromisslose Hygiene. Mit 40.000 U./Min. und einer Absaugung bis 320 l/Min. liefert es kraftvolle Leistung und überzeugt mit einer Lautstärke von nur 39,9 dB bei minimaler und 49,6 dB bei maximaler Absaugleistung. Das abnehmbare 7,8" TFT-Touchdisplay ermöglicht intuitive Bedienung, während bis zu 30 Benutzerprofile und Favoriteneinstellungen die Anpassung erleichtern. Das leichte und ergonomische Handstück verfügt erstmals über eine automatische Start-Stopp-Funktion und einen sterilisierbaren Wechselspannkopf zum selbst tauschen. NovaConnect zur Steuerung kompatibler Geräte und Service-Funktionen machen es zur perfekten Praxislösung. Ein DIY-Konzept mit Videos und passenden Ersatzteilen finden Sie online. Lieferumfang: Fußpflegegerät Nova Pro inkl. einem zusätzlichem Wechselspannkopf

5800001



Medizinprodukt



0483

Nova Interactive – intuitive Bedienung auf höchstem Niveau.

Sie werden es lieben! Das abnehmbare 7,8" TFT-Touchdisplay ist das absolute Highlight des Nova Pro. Alle Funktionen sind übersichtlich angeordnet – kein Suchen mehr! Die intuitive Bedienoberfläche ermöglicht eine schnelle und einfache Steuerung durch Swipen, Tippen und Personalisieren. Dank modernster Technologie lässt sich das Display problemlos mit Handschuhen bedienen. So können Sie direkt und ohne Umwege loslegen.



Handstück – leicht, ergonomisch und intelligent.

Das Handstück des Nova Pro wiegt nur 90 Gramm und ist für ergonomisches Arbeiten optimiert – egal ob in Feder- oder Obergriffhaltung. Die automatische Start-Stopp-Funktion sorgt für fließende und komfortable Bewegungsabläufe: Kein Suchen oder Drücken von Schaltern – das Handstück stoppt automatisch, sobald es in den Handstückhalter gesteckt wird. Dank der drehbaren Lagerung werden die Handgelenke entlastet. Der verschleißfreie Handstückmotor garantiert dabei eine dauerhaft zuverlässige Leistung.



Herzstück – leistungsstark und superleise.

Mit einer beeindruckenden Absaugleistung von 320 l/Min. und einer Lautstärke von nur 49,6 dB (bei maximaler Absaugleistung) bietet das Nova Pro höchste Effizienz bei minimaler Geräusentwicklung. Ein perfekt abgestimmtes Zusammenspiel aus verschleißfreien Turbinen, intelligenter Luftzirkulation und Geräuschmodulation sorgt dafür, dass Staub effektiv entfernt und gleichzeitig die Arbeitsatmosphäre angenehm bleibt. Hochwertige Dämmmaterialien und das besondere Absaugsystem gewährleisten zudem eine dauerhaft zuverlässige und geräuscharme Leistung.





Aufgeräumt und ergonomisch.

Das Instrumententablett für das Nova Pro ist die innovative Lösung für effizientes und ergonomisches Arbeiten mit dem ROOM move. Das Display wird mühelos im Displayhalter eingeklipst, sodass Sie das Gerät direkt steuern können. Instrumente und Utensilien sind griffbereit, während das Nova Pro diskret hinter einer Geräteblende verstaut bleibt – für fließende Bewegungsabläufe und optimalen Arbeitskomfort.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- > Schwenkbar für ergonomische Arbeitsabläufe
- > Handstückhalter mit integrierter Start-Stopp-Funktion
- > Auflagefläche B/T 33,1/23,3 cm – passend für das RUCK Instrumententablett groß
- > Cleaner Look & einfache Reinigung – das Fußpflegegerät bleibt dank Geräteblende unsichtbar im Schrank



Steuern Sie Ihre Praxis mit dem Nova Pro.

Intelligente Steuerung Ihrer MOON Behandlungsliege*

Mit dem Nova Pro steuern Sie die Behandlungsliege MOON kabellos per Funk – für eine komfortable und effiziente Anpassung während der Behandlung. Die intuitive Bedienung ermöglicht eine präzise Steuerung der Liegenposition und optimiert Ihren Workflow in der Praxis.

Updates und Servicefunktionen über IoT-Verbindung.

Dank IoT-Technologie bleibt Ihr Nova Pro immer auf dem neuesten Stand. Software-Updates werden automatisch eingespielt, während Echtzeit-Diagnosen und Wartungsempfehlungen Ausfallzeiten minimieren und die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängern.


*Kompatibel mit Behandlungsliegen ab Kaufdatum 01.07.2025.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- > Kabellose Steuerung – komfortable Bedienung der MOON Behandlungsliege
- > Automatische Updates – immer die neueste Software ohne zusätzlichen Aufwand
- > Echtzeit-Diagnose – transparente Überwachung von Betriebszeiten und Gerätezustand
- > Proaktive Wartung – frühzeitige Hinweise zur Vermeidung von Ausfällen
- > Mit dem Nova Pro nutzen Sie modernste Technologie für eine effiziente und zukunftssichere Praxis

Mehr Informationen in unserem Markenkatalog für Einrichtung.

Besuchen Sie hellmut-ruck.de

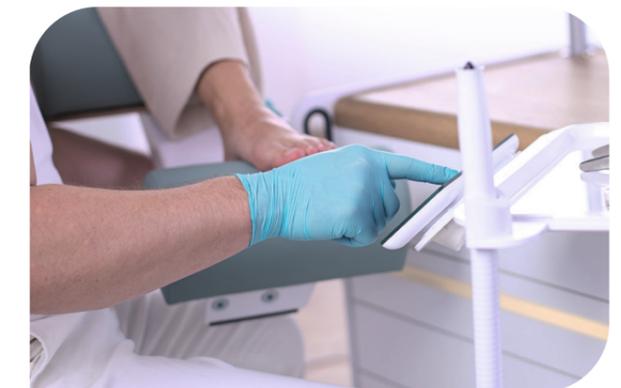

nova^{SE}

**Klein, leicht –
und voller
Power.**

work with ea^{SE}

Work with eaSE – arbeiten mit Leichtigkeit. Das neue RUCK Fußpflegegerät Nova SE vereint zuverlässige Technik mit intuitiver Bedienung und macht Ihren Arbeitsalltag einfacher. Entwickelt auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung, bietet es kraftvolle Leistung – optimal abgestimmt auf die täglichen Anforderungen in Ihrem Studio. Die perfekte Wahl für alle, die Wert auf Qualität, Effizienz und Komfort legen.


Smart Touch – präzise Steuerung mit modernster Technologie.

Das 4,7" TFT-Touchdisplay ist charakteristisch für das Nova SE und bietet Ihnen eine klare, übersichtliche Bedienoberfläche. Alle Funktionen sind optimal angeordnet – kein Suchen mehr! Die intuitive Navigation durch Swipen und Tippen ermöglicht eine schnelle und einfache Steuerung. Dank modernster Technologie lässt sich das Display sogar problemlos mit Handschuhen bedienen. So starten Sie sofort und ohne Umwege in Ihren Praxis- und Studioalltag.



Silent Power – effiziente Staubabsaugung.

Mit einer Absaugleistung von 255 l/Min. und einer Lautstärke von nur 45,5 dB bietet das Nova SE eine effiziente Staubabsaugung für einen reibungslosen Praxisalltag. Das optimierte Zusammenspiel aus verschleißfreien Turbinen, Luftzirkulation und Geräuschmodulation sorgt dafür, dass der Staub zuverlässig entfernt wird und die Arbeitsatmosphäre angenehm bleibt. Ein hochwertiges Absaugsystem und Dämmmaterialien garantieren eine dauerhaft verlässliche und leise Leistung.

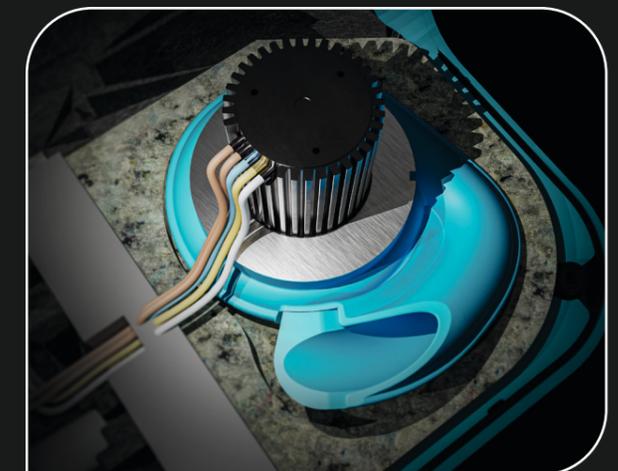

Fußpflegegerät Nova SE

Das RUCK Fußpflegegerät Nova SE bietet zuverlässige Technik und eine einfache Handhabung. Ein 2-Filterssystem und ein Konzept zur Schlauchreinigung sorgen für Reinheit und kompromisslose Hygiene. Mit 30.000 U./Min., einer Absaugleistung von bis zu 255 l/Min., liefert es kraftvolle Leistung und überzeugt mit einer Lautstärke von nur 39,9 dB bei minimaler und 45,5 dB bei maximaler Absaugleistung. Mit einem 4,7"-Touchdisplay lässt sich das Nova SE intuitiv und einfach bedienen. Speichern Sie bis zu 4 Favoriteneinstellungen. Das leichte und ergonomische Handstück verfügt erstmals über eine automatische Start-Stopp-Funktion und einen sterilisierbaren Wechselspannkopf zum selbst tauschen. Anleitungen und Features werden im Helpcenter erklärt. Ein DIY-Konzept mit Videos und passenden Ersatzteilen finden Sie online. Lieferumfang: Fußpflegegerät Nova SE inkl. einem zusätzlichen Wechselspannkopf.

5800101

Technische Daten:

- > 4,7" TFT-Touchdisplay
- > 4 Favoriten
- > 18 Sprachen auswählbar
- > Handstück-Drehzahl: 30.000 U./Min.
- > Automatische Start-Stopp-Funktion
- > Maximale Absaugleistung 255 l/Min.
- > Gewicht: 2,52 kg

Jetzt
kaufen



Welcher Nova passt zu mir?



Weitere Fußpflegegeräte online.



nova PRO	nova SE	Nova 3s
nova connect	-	-
Abnehmbares 7,8" TFT-Touchdisplay mit intuitiver Bedienoberfläche	4,7" TFT-Touchdisplay mit intuitiver Bedienoberfläche	DFSTN-Display
18 Sprachen zur Auswahl	18 Sprachen zur Auswahl	4 Sprachen zur Auswahl
30 Benutzerprofile	-	-
30 Favoriten	4 Favoriten	3 Favoriten
Handstück Drehzahl 40.000 U/Min.	Handstück Drehzahl 30.000 U/Min.	Handstück Drehzahl 40.000 U/Min.
HEPA-Filter	HEPA-Filter	-
Absaugung* 320 l/Min.	Absaugung* 255 l/Min.	Absaugung* 280 l/Min.
Lautstärke 39,9 - 49,6 dB*	Lautstärke 39,9 - 45,5 dB*	Lautstärke 41,6 - 48,7 dB*
Medizinprodukt Klasse 2a	-	Medizinprodukt Klasse 2a
Wechselspannkopf	Wechselspannkopf	-
2,75 kg	2,52 kg	2,65 kg



*bei maximaler Absaugleistung

Alle technischen Daten auf hellmut-ruck.de

Colour up your work.



Ihr Lieblingswerkzeug. So individuell wie Sie selbst.

Die hochwertige Handstückhülse aus Aluminium ist nicht nur leicht und robust, sondern auch in verschiedenen stilvollen Farben erhältlich. Perfekt abgestimmt auf Ihre persönlichen Vorlieben oder das Design Ihrer Praxis. Verleihen Sie Ihrem Fußpflegegerät Nova Pro und Nova SE einen individuellen Touch – für maximale Funktionalität mit einem Hauch von Persönlichkeit. Colour up your work!

Handstückhülse für Nova Pro/SE

Die Handstückhülse aus Aluminium überzeugt durch ihr geringes Gewicht, hohe Robustheit und eine hochwertige Eloxalbeschichtung. Sie ist in vier Farben erhältlich, passend zum Design der Praxis oder individuellen Vorlieben. Die präzise Verarbeitung sorgt für eine angenehme Haptik und ermöglicht eine komfortable Handhabung. Abbildung ähnlich.

Material: Aluminium

- 5802001 Salbei Aluminium
- 5802002 Black Aluminium
- 5802003 Gold Aluminium
- 5802004 Rose Aluminium

Clever und schnell, der RUCK- Wechselspannkopf.



Alle Ersatzteile online.
Besuchen Sie hellmut-ruck.de



Der Wechselspannkopf lässt sich schnell und unkompliziert tauschen: Abziehhilfe ansetzen, Wechselspannkopf herausziehen, fertig.

Tipp: Reinigen Sie die Kupplung einmal täglich mit der Reinigungslösung im Rahmen der Aufbereitung. So bleibt die Haltefunktion Ihrer Instrumente dauerhaft zuverlässig erhalten.



Reinigungslösung für Kupplung des Wechselspannkopfs

Die Reinigungslösung ist speziell für die Pflege und Reinigung der Kupplung des Wechselspannkopfs entwickelt worden. Sie entfernt zuverlässig Staub und Ablagerungen und trägt zur langfristigen Funktionalität und Hygiene Ihrer Nova Pro und Nova SE Fußpflegegeräte bei.

Verpackungsinhalt: 50 ml

5802101

Abziehhilfe inkl. Fräserlehre für Nova Pro/SE

Ermöglicht das einfache Herausziehen des Wechselspannkopfs aus dem Handstückkörper. Eine Fräserlehre ist in der Abziehhilfe integriert.

5802201 1 Stück

Reinigungsstäbchen für Nova Pro/ Nova SE

Einfaches Reinigen der Lagerbuchse der Kupplung mit dem Reinigungsstäbchen und der passenden Reinigungslösung.

5801801 1 Stück



Wechselspannkopf des Nova Pro oder Nova SE, 3 Stück

Der Wechselspannkopf ist das unverzichtbare Zubehör für Ihr Handstück und sorgt dafür, dass Ihre Instrumente sicher und präzise gehalten werden. Nach längerer Einsatzzeit kann die Spannkraft des Wechselspannkopfs nachlassen, was den Austausch erforderlich macht – ein normaler Verschleiß, der mit diesem Zubehör unkompliziert behoben wird. Im Lieferumfang sind drei Wechselspannköpfe sowie eine praktische Abziehhilfe enthalten, sodass Sie den Wechsel schnell und eigenständig durchführen können. Durch die einfache Entnahme und Reinigung (wir empfehlen nach jeder Behandlung oder mindestens 1x am Tagesende) wird eine lange Lebensdauer gewährleistet, während Staubablagerungen effektiv entfernt werden können.


5801701 3 Stück



Hygiene auf neuem Level.



Der Nova Pro und der Nova SE setzen mit ihrem revolutionären 2-Filterssystem neue Maßstäbe. Erstmals integriert: ein HEPA-Filter, der selbst feinste Staubpartikel entfernt. Zusammen mit dem Staubfilterbeutel sorgt er für eine herausragende Filterleistung und eine hygienische Arbeitsumgebung. Die Wechselanzeige erinnert rechtzeitig an den Filtertausch. Für eine einfache Handhabung bietet das Helpcenter Anleitungen und DIY-Videos, die den Filterwechsel und weitere Funktionen Schritt für Schritt erklären.

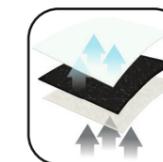

Reicht für ca. 150 Behandlungen




Staubfilter Maße: 18/12,5/2 cm

Staubfilterbeutel für Nova Pro/SE, 4 Stück

Unser hochwertiger Staubfilterbeutel mit 3-lagigem Filtermaterial und Aktivkohleschicht wurde speziell für die Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE entwickelt. Während der Anwendung absorbiert er effektiv Verunreinigungen, neutralisiert Gerüche und sorgt für eine maximale Staubbindung. Das Fassungsvermögen des Beutels reicht für bis zu 150 Behandlungen. Ein regelmäßiger Wechsel wird empfohlen, sobald der Beutel einen Füllgrad von 80 % erreicht hat, spätestens jedoch bei voller Auslastung (100 %). Dank des Einfilterprinzips lässt sich der Filter einfach und schnell austauschen.

5801001 4 Stück

Reicht für ca. 3000 Behandlungen

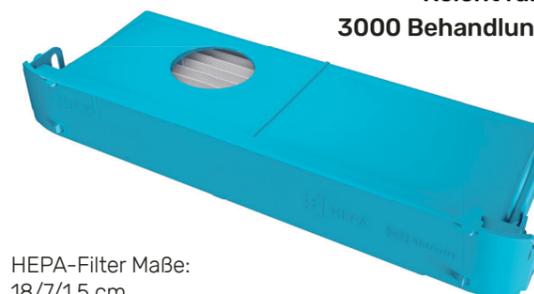

HEPA-Filter Maße: 18/7/1,5 cm

HEPA-Filter für RUCK Fußpflegegerät Nova Pro/SE, 1 Stück

Der hochwertige HEPA-Filter für die RUCK Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE gewährleistet eine effektive Reinigung der Luft während der Anwendung. Dank seiner langlebigen Konstruktion aus hochwertigen Materialien bietet der HEPA-Filter eine kontinuierlich optimale Leistung. Der Filter lässt sich leicht austauschen und ein regelmäßiger Wechsel nach 400 Betriebsstunden oder spätestens nach 12 Monaten wird empfohlen.


5801101 1 Stück

DIY-Anleitungen und Videos finden Sie in unserem **Helpcenter**.





It's a match!
Passt perfekt in Ihre Lieblingseinrichtung.

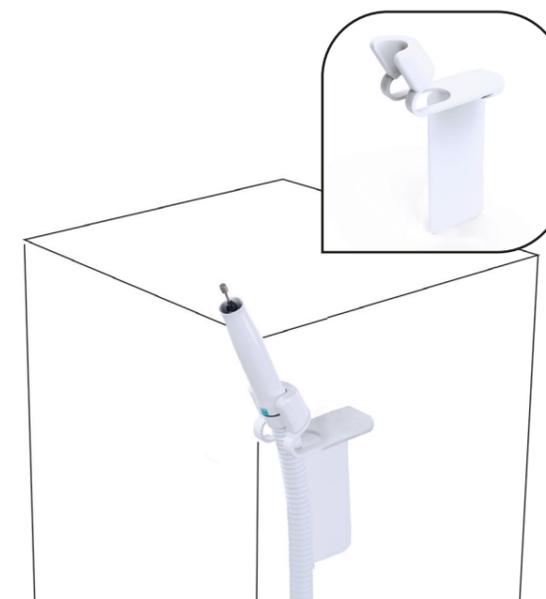


Handstückhalter für Wand oder Fremdschrank

Handstückhalter zur einfachen Montage durch Kleben an Wänden oder Schränken – die flexible Lösung für das Handstück der Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE. Sorgt für effizientes Arbeiten dank integrierter automatischer Start-Stopp Funktion.

Material: Kunststoff | Farbe: Weiß | passend für: Wand oder Fremdschrank
Montage: Kleben

- 5802504** für Rechtshändige
- 5802509** für Linkshändige

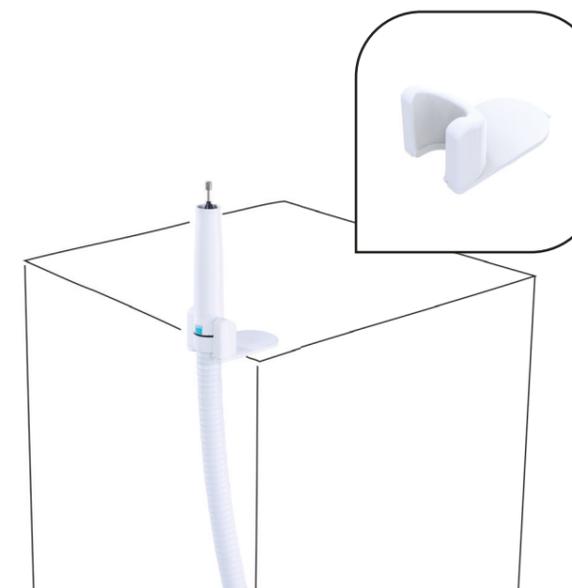

Handstückhalter freistehend für Nova Pro/SE

Freistehender Handstückhalter mit Klebmontage für maximale Flexibilität – ideal zur individuellen Platzierung auf Tischen oder Ablageflächen. Entwickelt für das Handstück der Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE und optimiert für effizientes Arbeiten dank integrierter Auto-On/Off-Funktion.

Material: Kunststoff | Farbe: Weiß | passend für: alle Ablageflächen
Montage: Kleben

- 5802505**



Instrumententablettablage Set mit Displayhalter für Nova Pro inkl. Geräteblende für ROOM move

Material: Edelstahl | Farbe: Weiß | passend für: ROOM move
Montage: Anbringung mit Connector (inklusive)

- 5803001** Set Instrumententablettablage und Blende für ROOM move S für Rechtshändige
- 5803002** Set Instrumententablettablage und Blende für ROOM move S für Linkshändige
- 5803003** Set Instrumententablettablage und Blende für ROOM move M/L für Rechtshändige
- 5803004** Set Instrumententablettablage und Blende für ROOM move M/L für Linkshändige
- 5802601** Instrumententablettablage für Rechtshändige
- 5802602** Instrumententablettablage für Linkshändige
- 5020001** Geräteblende ROOM move S
- 5020002** Geräteblende ROOM move M/L



Handstückhalter magnetisch ROOM move für Nova Pro/SE

Magnetischer Handstückhalter zur einfachen Befestigung an allen ROOM move Möbeln. Praktisch und passgenau für das Handstück der Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE. Ermöglicht effizientes Arbeiten dank integrierter automatischer Start-Stopp-Funktion.

Material: Aluminium | Farbe: Weiß | passend für: ROOM move
Montage: Anbringung mit Magnetfläche

- 5802503** für Rechtshändige
- 5802508** für Linkshändige




Handstückhalter ROOM classic für Nova Pro/SE

Handstückhalter zur mühelosen Montage an allen ROOM classic Möbeln – optimal passend für die Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE. Sorgt für effizientes Arbeiten mit integrierter automatischer Start-Stopp-Funktion.

Material: Kunststoff | Farbe: Weiß | passend für: ROOM classic
Montage: Anbringung an Chrom-Säule

- 5802502**

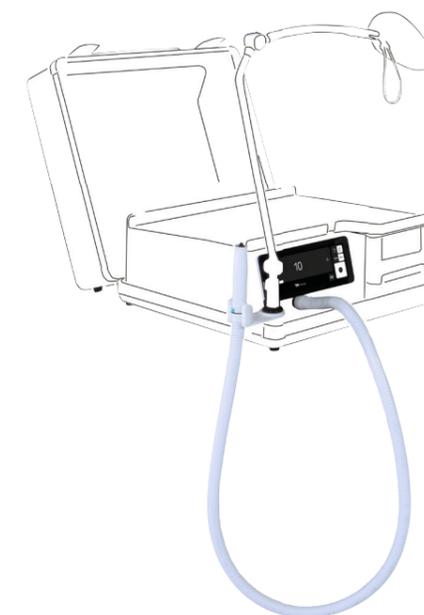

Handstückhalter RUCK mobilsystem für Nova Pro/SE

Handstückhalter zur einfachen Montage an das RUCK mobilsystem. Passend für Rucksack oder Koffer, speziell für das Handstück des Fußpflegegeräts Nova Pro und Nova SE entwickelt. Sorgt für effizientes Arbeiten mit integrierter automatischer Start-Stopp-Funktion.

Material: Kunststoff | Farbe: Weiß | passend für: RUCK mobilsystem
Montage: Anbringung an Leuchtenhalter

- 5802501**

Das Hygienekonzept – Reinheit ohne Kompromisse.



Vorbereitung

1. Gerät vom Stromnetz trennen
2. Blende mit Schlauch vom Gerät trennen
3. Steckrohr von der Blende entfernen
4. Sicherungsnase aus der Halterung lösen
5. Motorkabel am Stecker in den Kabelhalter der Kabel-Einziehhilfe drücken
6. Schutzkappe über den Stecker ziehen
7. Blende vom Saugschlauch abschrauben
8. Handstückhülse vom Saugschlauch abschrauben
9. Halten Sie den Handstückmotor mit der einen Hand und ziehen Sie den Saugschlauch mit der anderen Hand vom Motorkabel ab

Reinigung und Desinfektion

10. Motorkabel mit Desinfektionstüchern reinigen
11. Schlauch zur Reinigung der Innenseite in ein Desinfektionsbad legen
12. Schlauch vertikal aufhängen
13. Nach der Reinigung des Saugschlauchs in einem Desinfektionsbad muss der Schlauch trocknen, Trocknungszeit ca. 12 Stunden



Schlauchreinigung-Set für Nova Pro/SE

Das Schlauchreinigungsset für die RUCK Fußpflegegeräte Nova Pro und Nova SE bietet Ihnen eine einfache und hygienische Lösung zur Reinigung des Flex-Saugschlauchs. Ablagerungen werden gründlich entfernt, sodass die optimale Funktion und Langlebigkeit des Saugschlauchs gewährleistet bleibt. Nach der Reinigung können Sie den Saugschlauch bequem aufhängen und trocknen lassen – für eine hygienische und praktische Handhabung in Ihrem Praxisalltag.

5802701	Set-Bestandteile: 2x Wandhaken 1x Wandhalter 1x Tablett
1 5801901	Auffangschale und Halter für Schlauchreinigung für Nova Pro/SE
2 5802301	Halter für Schlauchreinigung für Nova Pro/SE, 2 Stück

Schlauch-
reinigung im
DIY-Video.



**Flex-Saugschlauch,
145 cm, weiß für Nova
Pro/SE, 1 Stück**

4973201 1 Stück

Tipp: Bestellen Sie einen zusätzlichen Flex-Saugschlauch als Zubehör – so bleiben Sie flexibel während der Trocknungszeit von 12 Stunden. In Kombination mit einer Auffangschale können Sie sogar bis zu drei Schläuche gleichzeitig verwenden!



care **plus**

Damit Ihre Praxis immer auf 100 % läuft.

Mit CarePlus profitieren Sie von einem exklusiven Service für Fußpflegegeräte und Behandlungsliegen. CarePlus enthält eine mehrjährige Herstellergarantie, dass unsere Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind sowie proaktive Wartungs- und Reparaturleistungen – für maximale Sicherheit und minimale Ausfallzeiten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- > 36 oder 72 Monate Garantie, je nach Laufzeit
- > Wartung und Reparatur durch RUCK-Kundenservice inklusive
- > Keine Versandkosten
- > Bereitstellung eines kostenfreien Leihgerätes

Unsere Empfehlung

**CarePlus für 3 Jahre
ab 17,95 € im Monat***

> 1x Wartung PLUS inklusive

**CarePlus für 6 Jahre
ab 19,95 € im Monat***

> 2x Wartung PLUS inklusive

*Erhältlich für alle neu gekauften RUCK Fußpflegegeräte und Behandlungsliegen. Es gelten die aktuellen AGB, die Sie in unserem RUCK-Onlineshop einsehen können. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



Mehr
Informationen
online.

Besuchen Sie
hellmut-ruck.de/careplus

Vom Goldschmiedemotor zum Hightech Podologiegerät.

Die mehr als 90-jährige Geschichte der HELLMUT RUCK GmbH begann mit dem Ziel, die Fußpflege und Podologie für alle zugänglicher zu machen, Wissen zu bündeln und weiterzugeben. Doch es war auch immer der Innovationsgeist, der Antrieb, Behandlungszubehör kontinuierlich weiterzuentwickeln. Was in 1927 als einfaches Schleifgerät aus der Pforzheimer Goldschmiedebbranche begann, legte schon bald den Grundstein für moderne und leistungsfähigere Fußpflegegeräte.



Da viele Hersteller den hohen Anforderungen von Hellmut Ruck und seinem Team nicht gerecht werden konnten, wurde 1994 die erste eigene Serie professioneller Fußpflegegeräte entwickelt. Mezzo, Micro und Maxi markierten den Beginn einer neuen Ära der Fußpflege. Die Einführung von Fußpflegegeräten mit Rundumabsaugung war eine echte Revolution. Sie bot die ideale Alternative zur in der Dentalbranche etablierten Nasstechnik, die seither insbesondere aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen überflüssig geworden ist.



Nach zahlreichen Optimierungen und Modellgenerationen folgte in 2003 mit dem Nova ein revolutionäres Gerät, das mit seiner ikonischen Handstückablage zum Sinnbild der neuen RUCK-Produktphilosophie wurde: intelligentes Design in perfekter Symbiose mit Funktionalität. Als erstes Medizinprodukt seiner Art setzte das Nova völlig neue Maßstäbe in den Bereichen Lautstärke, Leistung und Gewicht.



Mit den Modellen Nova 3 und Nova 3s wurde diese Vision auf ein neues technisches Niveau gehoben. Die intuitive Bedienung und das perfekt abgestimmte Zubehörsortiment entstanden, wie bis heute, im engen Austausch mit der Praxis. Die stetige Optimierung von Leistung und das besonders leise Betriebsgeräusch manifestierten sich in der Kampagne "Meister der leisen Töne" – ein neuer Branchen-Standard war gesetzt. Das podolog Nova 3s erfüllte sämtliche Anforderungen an ein europäisches Medizinprodukt nach MDR-Richtlinien.



Teamwork at it's best. Wie der Nova entstand.



Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte hat dazu geführt, dass immer mehr Fachwissen innerhalb des Unternehmens gebündelt wurde. Heute arbeiten bei RUCK Ingenieur:innen, UX-Designer:innen, Produktentwickler:innen, Monteur:innen und Einkäufer:innen und Marketingexpert:innen Hand in Hand, um die beste Ausstattung für Podolog:innen zu schaffen. Die familiäre Teamdynamik, das ständige Lernen und der unermüdliche Antrieb zur Optimierung führen zu Produkten, die Maßstäbe setzen.

"Wir hören unseren Kundinnen und Kunden zu, verstehen ihre Arbeit und beobachten Innovationen genau, um sie gezielt dort einzusetzen, wo sie den größten Mehrwert bieten. Unser Anspruch ist es, zeitgemäß zu denken, zu gestalten und zu handeln."

Michael Fürtsch
Entwicklungsleitung



Mit der Inhouse-Produktion der MOON-Liegenserie wurde die Manufaktur Teil unseres Unternehmens. Perfekter Service gelingt nur, wenn das Know-how direkt in Neuenbürg verankert ist. Der innovative Aufbau der neuen Nova Geräte ermöglicht den Standort Deutschland, da wir die Produktionszeiten halbieren konnten. Erstmals fertigen wir den neuen Nova in einer eigens errichteten Produktionsstätte auf unserem Firmengelände – ein Meilenstein der RUCK Geschichte.



Der neue Nova Pro und der Nova SE sind die modernsten und leistungsstärksten Fußpflegegeräte auf dem Markt. Erleben Sie den Nova Pro und Nova SE jetzt live – bei RUCK, auf Messen, auf der Footexpo, in unserer RUCK-Erlebnisswelt oder online unter hellmut-ruck.de. Und – **bleiben Sie gespannt!**

mobilsystem

Neu!
Das beste System, das
wir je entwickelt haben.

Mehr
Informationen
in unserem
Markenkatalog.

Besuchen Sie
hellmut-ruck.de



Jetzt einfach
online
bestellen!

hellmut-ruck.de

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
75305 Neuenbürg
Germany
fon +49 (0)7082 944 20
fax +49 (0)7082 944 22 22
kontakt@hellmut-ruck.de
hellmut-ruck.de

Kundenberatung:

+49 (0)7082 944 22 33

Unsere Kundenberatung ist von Montag
bis Freitag durchgehend von 7:30 bis 18:00 Uhr
persönlich für Sie da.

Besuchen Sie unsere RUCK-Erlebniswelt in Neuenbürg
und folgen Sie uns auf



Alle Preise in Euro, freibleibend und zzgl. der ges. USt. Andere Währungen
(z. B. CHF) sind im RUCK-Onlineshop einsehbar. Es gelten die aktuellen AGB,
die Sie in unserem RUCK-Onlineshop einsehen können. Änderungen und
Irrtümer vorbehalten. Dekorationsselemente sind nicht im Lieferumfang enthalten
und dienen nur der Veranschaulichung.

