



Plastikfreie 2in1 Tücher für die schonende Desinfektion und Reinigung, auch von empfindlichen Oberflächen.

100 %
PLASTIKFREE
TÜCHER

ENTFERNT
99,99%
DER KEIME

SCHNELL
WIRKSAM
AB 15 SEK.

AUCH FÜR
EMPFINDLICHE
OBERFLÄCHEN

mikroqid® universal wipes 2in1

Unser Plus:

- 2in1: Desinfektion und Reinigung
- Entfernt 99,99 % aller Keime und ist damit umfassend wirksam gegen Bakterien (bspw. *E. coli*), Hefepilze und spezielle Viren (wie z. B. Influenza- oder Coronaviren sowie Rota- und Noroviren)
- Schnelle Wirksamkeit bereits ab 15 Sekunden
- Sehr gute Reinigungsleistung
- Besonders materialschonend selbst für empfindliche Oberflächen
- 100 % plastikfreie Tücher aus nachwachsenden Rohstoffen
- Parfüm- und farbstofffrei
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- Immer griffbereit in wiederverschließbarer Verpackung

Anwendungsgebiete

Die mikroqid® universal wipes 2in1 sind niedrig-alkoholische, gebrauchsfertige Tücher für verschiedene Oberflächen in einer praktischen, wiederverschließbaren Verpackung.

Sie desinfizieren und reinigen besonders schnell und zuverlässig selbst empfindliche Flächen, wie z. B. Smartphone-Displays, Touchscreens, Monitore, Tastaturen oder Kunstleder.

Durch das praktische, wiederverschließbare Format können die Tücher überall dort zum Einsatz kommen, wo außerhalb von Gesundheitseinrichtungen eine zuverlässige Desinfektion und wirksame Reinigung erforderlich sind. Beispielsweise bei der häuslichen Pflege oder um Krankheitserreger in einem Ausbruchsfall zu Hause einzudämmen.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
Bakterien / Pilze		
bakterizid EN 13727 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Sek.
bakterizid EN 16615 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
bakterizid gemäß VAH-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten - geringe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid EN 13624 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid EN 16615 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid gemäß VAH-Richtlinien - geringe Belastung	gebrauchsfertig	1 Min.
tuberkulozid EN 14348 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	5 Min.
Viren		
begrenzt viruzid EN 14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Sek.
begrenzt viruzid PLUS EN 14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	15 Min.
Norovirus EN 14476 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	30 Sek.
Norovirus EN 14476 - hohe Belastung	gebrauchsfertig	60 Sek.
Polyoma SV40 gemäß DVV/RKI-Leitlinie	gebrauchsfertig	15 Sek.
Rotavirus EN 14476 - geringe Belastung	gebrauchsfertig	15 Sek.

Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste



mikrozid® universal wipes 2in1

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 17,4 g Propan-2-ol, 12,47 g Ethanol (94 % w/w)

Kennzeichnung gemäß VO (EG)

Nr.648/2004: < 5% anionische Tenside

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,95 g/cm ³ / der Wirkstofflösung
Farbe	farblos
Flammpunkt	26 °C / Methode : DIN 51755 Part 1 / der Wirkstofflösung
Form	Wässrig-alkoholische Lösung auf Vliesstoff
pH	ca. 3,5 / 100 % / der Wirkstofflösung
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Produkt ist gut materialverträglich bei Metallen und Kunststoffen. Vorab an unauffälliger Stelle testen. Nicht auf alkoholempfindlichen Lacken einsetzen.

Die Tücher können nach Erstöffnung bis zu 30 Tage verwendet werden.

Anwendungshinweise

Tuch entnehmen und die Oberfläche gründlich abwischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Bei starker Verschmutzung mit separatem Tuch vorreinigen. Die Fläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Bei Bedarf weiteres Tuch verwenden. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten. Tücher können sich bei längerem Kontakt mit der Luft gelb verfärben. Ausgetrocknete Tücher haben keine Desinfektionswirkung. Tücher nach Gebrauch im Hausmüll entsorgen. Das Produkt ist ohne Handschuhe verwendbar. Nicht zur Reinigung oder Desinfektion der Haut verwenden.

BAuA-Nr.: N-115502, N-115757

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
mikrozid® universal wipes 2in1	12 / Karton	70004164 PZN: 19726691

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 52100-0
Fax +49 40 52100-318
www.schuelke.com
info@schuelke.com